



COLUMNA

# Siluete™ Sistema de Corporectomía



**NOVAXDMA**  
DISPOSITIVOS MÉDICOS AVANZADOS

## Contenido

- 3 Componentes
- 4 Instrumental
- 5 Técnica quirúrgica
- 7 Contacto




## Componentes

- R10.20** Dispositivo corporectomía diam 10mm - L:18mm
- R10.30** Dispositivo corporectomía diam 10mm - L:34mm
- R10.40** Dispositivo corporectomía diam 10mm - L:42mm
- R10.50** Dispositivo corporectomía diam 10mm - L:50mm
- R10.60** Dispositivo corporectomía diam 10mm - L:58mm




- R19.50** Dispositivo corporectomía diam 19mm - L:50mm
- R19.70** Dispositivo corporectomía diam 19mm - L:74mm
- R19.90** Dispositivo corporectomía diam 19mm - L:90mm.
- R19.110** Dispositivo corporectomía diam 19mm - L:114mm
- R19.130** Dispositivo corporectomía diam 19mm - L:130mm

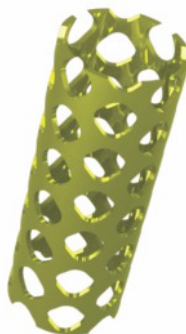

- R12.20** Dispositivo corporectomía diam 12,7mm - L:18mm
- R12.30** Dispositivo corporectomía diam 12,7mm - L:34mm
- R12.40** Dispositivo corporectomía diam 12,7mm - L:42mm
- R12.50** Dispositivo corporectomía diam 12,7mm - L:50mm
- R12.60** Dispositivo corporectomía diam 12,7mm - L:58mm



- R25.40** Dispositivo corporectomía diam 25mm - L:42mm
- R25.60** Dispositivo corporectomía diam 25mm - L:58mm
- R25.80** Dispositivo corporectomía diam 25mm - L:82mm
- R25.100** Dispositivo corporectomía diam 25mm - L:98mm
- R25.110** Dispositivo corporectomía diam 25mm - L:114mm
- R25.125** Dispositivo corporectomía diam 25mm - L:126mm
- R25.150** Dispositivo corporectomía diam 25mm - L:154mm

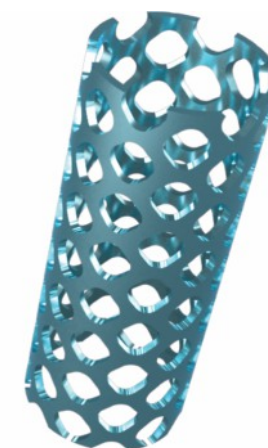

## Instrumental

**020 013 01** Cizalla grande



**020 022 00** Pinza Distractora (opcional)



**020 020 42** Pusher



**050 020 34** Martillo Impactor





**020 001 00** Contenedor externo

## Técnica quirúrgica

Las imágenes publicadas son de carácter ilustrativo

Determine el tamaño necesario de la celda a utilizar (diámetro y largo) y de ser necesario utilice la cizalla grande (020 013 01) para recortar el implante a la altura apropiada.

Llene el interior de la celda con el material de injerto deseado.

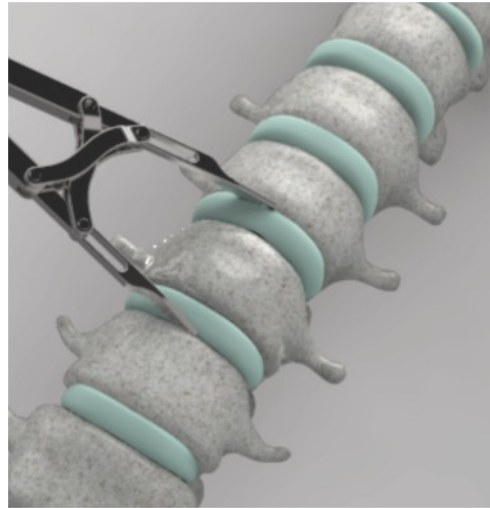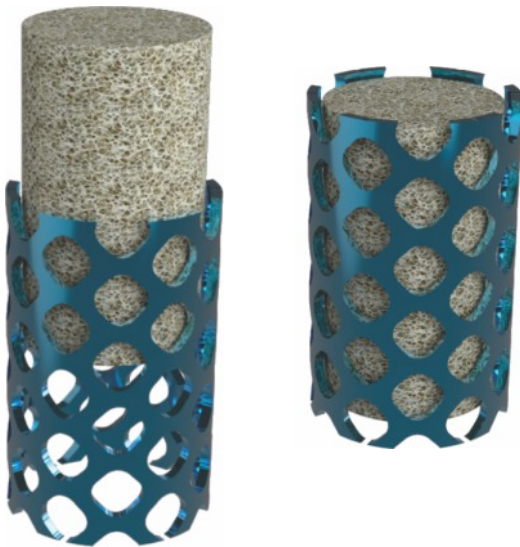

Durante la planificación de la corpectomía debe seleccionarse el tipo de abordaje (anterior, lateral o anterolateral), Dependiendo del nivel espinal involucrado. Realizar una corpectomía parcial o completa, según sea necesario.



Retire sólo las capas superficiales de la placa cartilaginosa y exponga el hueso sangrante.

Precaución: Si se retira toda la placa terminal, puede producirse hundimiento y pérdida de estabilidad segmentaria.

Distraiga el sitio de corpectomía a la corrección deseada usando la pinza distractora (020 022 00) y mida la altura del defecto.




### Advertencia

Esta descripción de la técnica no es suficiente para su aplicación clínica inmediata.  
Se recomienda firmemente el aprendizaje práctico junto a un cirujano experimentado.

## Técnica quirúrgica

Las imágenes publicadas son de carácter ilustrativo

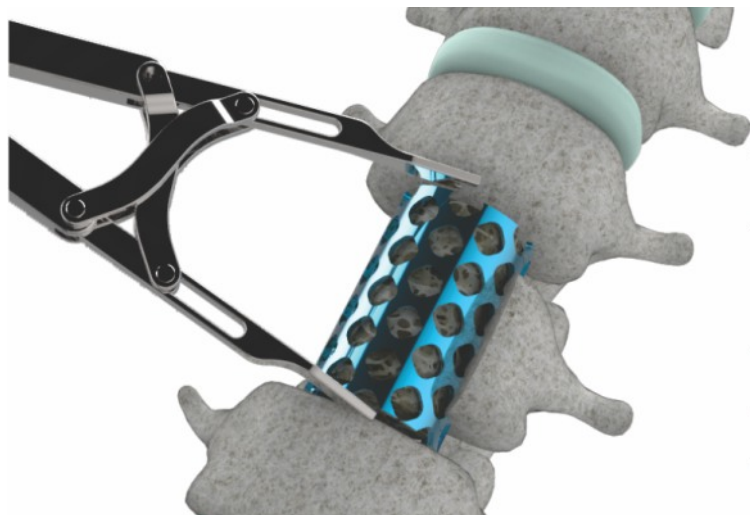

Usando la pinza distractora (020 022 00), distraiga el sitio del injerto hasta que se consiga la alineación espinal deseada. Durante la distracción, inserte el implante.

Una vez que el implante está en su lugar, retire suavemente la pinza distractora (020 022 00).



Para asegurar la estabilidad de la columna vertebral y mantener una compresión adecuada en la construcción, el sistema está indicado para su uso con fijación anterior y / o posterior complementaria.

(ver sistemas disponibles en [www.novaxdma.com](http://www.novaxdma.com))

Consulte los catálogos, técnicas quirúrgicas e instrucciones de uso para obtener información sobre las indicaciones, descripciones, contraindicaciones, precauciones, advertencias y riesgos potenciales asociados con estos sistemas de implantes.

### Advertencia

- Esta descripción de la técnica no es suficiente para su aplicación clínica inmediata.
- Se recomienda firmemente el aprendizaje práctico junto a un cirujano experimentado.



COLUMNA

# Siluete™ Sistema de Corporectomía

Rev. F  
Julio 2022



## **Contactate** con nosotros

Manuel Fraga 923 - C1427BTS - 54 11 4554 6430/1  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - ARGENTINA  
[www.novaxdma.com](http://www.novaxdma.com)

Autorizado por la ANMAT: **PM1621-23**  
El sistema de gestión de la calidad de  
NOVAX DMA ha sido certificado según  
la norma **IRAM-ISO 13485:2019**

Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Directora técnica NO ESTÉRILES: Bioing. Vanina Croce - MN: 5699

La revisión vigente del presente catálogo se encuentra publicada en [www.novaxdma.com](http://www.novaxdma.com)