



TRAUMA

INMEDICA™

Sistema de Reconstrucción Costal



NOVAXDMA

DISPOSITIVOS MÉDICOS AVANZADOS

Contenido

- 3 **Implantes**
- 4 **Instrumental**
- 7 **Técnica Quirúrgica**

Componentes

Placas costales


650-1000	Placa costal, 26mm ancho 13 x 2 orif
650-1004	Placa costal, 46mm ancho 13 x 4 orif
650-1005	Placa costal, 56mm ancho 13 x 4 orif
650-1007	Placa costal, 70mm ancho 13 x 4 orif
650-1010	Placa costal, 100 mm ancho 13 x 4 orif
650-2000	Placa costal, 26mm ancho 15 x 2 orif
650-2002	Placa costal, 46mm ancho 15 x 4 orif
650-2005	Placa costal, 56mm ancho 15 x 4 orif
650-2007	Placa costal, 70mm ancho 15 x 4 orif
650-2010	Placa costal, 100 mm ancho 15 x 4 orif
650-3000	Placa costal, 26mm ancho 17 x 2 orif
650-3004	Placa costal, 46mm ancho 17 x 4 orif
650-3005	Placa costal, 56mm ancho 17 x 4 orif
650-3007	Placa costal, 70mm ancho 17 x 4 orif
650-3010	Placa costal, 100 mm ancho 17 x 4 orif



Componentes

Placas costales

- 650-4011** Clip costal de titanio 3D, Estándar 6 segmentos
- 650-4012** Clip costal de titanio 3D, XL 6 segmentos
- 650-4013** Clip costal de titanio 3D, Estándar 9 segmentos
- 650-4014** Clip costal de titanio 3D, XL 9 segmentos
- 650-4015** Clip costal de titanio 3D, Estándar 13 segmentos
- 650-4016** Clip costal de titanio 3D, XL 13 segmentos

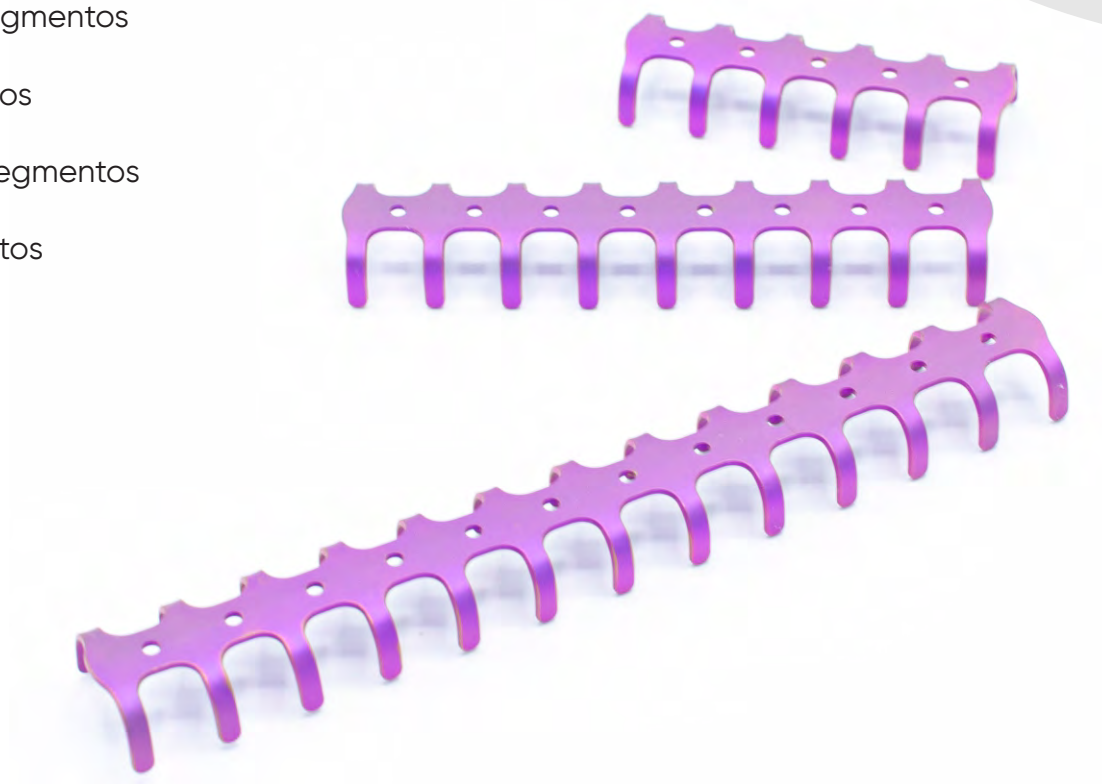

Instrumental

Sistema de Reconstrucción Costal



NOVAXDMA
DISPOSITIVOS MÉDICOS AVANZADOS

Componentes Instrumental

650 370 02 Pinza de reducción derecha unilateral



650 370 01 Pinza de reducción cierre columna



650 006 78 Pinza de reducción recta



650 168 03 Elevador perióstico, borde recto



040 013 01



650 006 77 Pinza de reducción curva



650 006 76 Pinza de reducción tipo pistola



Componentes Instrumental

- 650 002 73** Contenedor externo
- 650 002 83** Contenedor de implantes N1 (p/placas costales)
- 650 002 84** Contenedor de implantes N2 (p/ clips costales)



Técnica Quirúrgica

Para Sistema de Reconstrucción Costal



Consideraciones pre operacionales

El paciente deberá estar al tanto de los posibles riesgos de la cirugía incluyendo, dolor persistente, infección, lesión neurológica, lesión vascular o visceral o falla de la fusión que pudiera resultar del aflojamiento o ruptura del implante, necesitando otra cirugía, antes de decidir realizar dicha operación. El cirujano podrá tener en consideración el tener que realizar una autotransfusión sanguínea para cirugías de multiniveles o en aquellas que sean prolongadas

Utilizando las RX preoperatorias la resonancia magnética o la tomografía computada, el cirujano deberá determinar los niveles a intervenir y su abordaje.

Se recomienda administrar antibióticos de primera generación antes de realizar la incisión para reducir riesgos de infección.

! Advertencia

- Esta descripción de la técnica no es suficiente para su aplicación clínica inmediata.
Se recomienda firmemente el aprendizaje práctico junto a un cirujano experimentado.

Técnica Quirúrgica

Para Sistema de Reconstrucción Costal

Presentación

Una vez realizado el abordaje y seleccionada la placa a utilizar


Se presenta la misma sobre la costilla y se cierran los clips



650 006 78 Pinza de reducción recta

650 370 02 Pinza de reducción derecha unilateral

650 168 03 Elevador perióstico, borde recto

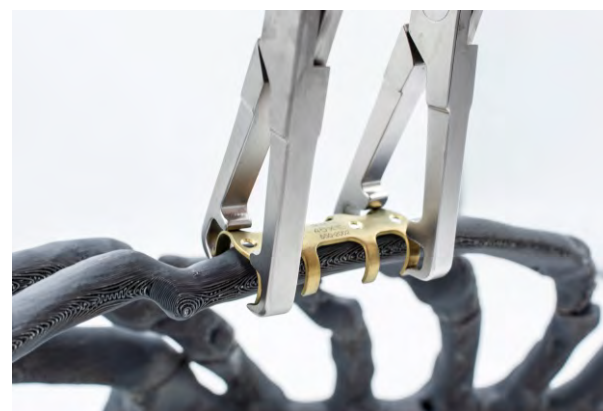

- ! **Advertencia**
Esta descripción de la técnica no es suficiente para su aplicación clínica inmediata.
Se recomienda firmemente el aprendizaje práctico junto a un cirujano experimentado.

Técnica Quirúrgica

Para Sistema de Reconstrucción Costal

Para realizar la maniobra de cierre de los clips de la placa existen diferentes tipo de pinzas que sirven para una mejor adaptación de la maniobra en relación a la posición de la costilla

Ver pinzas disponibles en pag: 5





INMEDICA™

Sistema de Reconstrucción Costal

Rev.C
Enero 2022



Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias
Directora técnica NO ESTÉRILES: Bioing. Vanina Croce – MN: 5699

Contactate con nosotros

Manuel Fraga 923 – C1427BTS – 54 11 4554 6430/1
Ciudad Autónoma de Buenos Aires – ARGENTINA
www.novaxdma.com

Autorizado por la ANMAT: **PM1621-27**
El sistema de gestión de la calidad de
NOVAX DMA ha sido certificado según
la norma **ISO 13485:2016**

La revisión vigente del presente catálogo se encuentra publicada en www.novaxdma.com